

Titel: Northpop instruktion till personal på Förlossningen navelsträngsblod vid förlossning	Version: 1.2	Gäller fr. o. m: 2016-09-01 t.v.
Utfärdad av: Carina Lagerqvist	Datum: 2016-08-22	
Granskad av: Christina West, Hanna Nyström, Anna Qvarnström	Datum:	

Northpop - Instruktion till personal på Förlossningen navelsträngsprov vid förlossning

Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen med 3 fasthäftade klisteretiketter

Prov:

- Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6 ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning från navelsträngen.
- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd röret ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Märk röret med en klisteretikett med barnets BB-nummer.

Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Skriv BB-numret på samtliga 3 klisteretiketter på remissen. Märk provröret med EN av dessa etiketter. De andra 2 klisteretiketterna på remissen ska du låta sitta kvar, dessa är för Blodcentralens hantering av proverna.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs på remissen. **OBS! Väldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll på remissen och kryssa i att det är ett navelsträngsprov.

Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med barnets BB-nummer ska snarast möjligt skickas med ordinarie provtransport till Blodcentralen där provet tas omhand. Målsättningen är att provet skall centrifugeras och frysas inom en timme från provtagningstillfället.

Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, biomedicinsk analytiker, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86

Hanna Nyström, studiekoordinator, hanna.a.nystrom@umu.se, tfn 072-245 45 57

Anna Qvarnström, barnmorska förlossningen, tfn 070-240 03 25