

Titel: Northpop instruktion Mödrahälsovården provtagning av mammor i samband med rutinprover vid graviditetsvecka 28	Version: 1.1	Gäller fr. o. m: 2016-05-25
Utfärdad av: Carina Lagerqvist	Datum: 2016-05-24	
Granskad av: Christina West	Datum: 2016-05-25	

Northpop - Instruktion till personal på Mödrahälsovården blodprov mamma v. 28

Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen (pdf-fil kan laddas ner från hemsidan: www.northpop.se)

Prov:

- Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning.
- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd rören ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Skriv ut 4 st klisteretiketter med mammans namn och personnummer. Skriv NORTHPOP på en av etiketterna och märk röret med denna.



Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Märk remissen med mammans namn och personnummer (använd en av klisteretiketterna). De sista två etiketterna häftas fast på remissen, dessa är för Blodcentralens hantering av proverna.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs. **OBS! Väldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll.

Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med mammans namn och personnummer ska snarast möjligt skickas med ordinarie provtransport till Norrlands Universitetssjukhus där provet tas omhand på Blodcentralen.

Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86 eller Hanna Nyström, hanna.a.nystrom@umu.se, tfn 072-245 45 57