

Titel: <b>Northpop instruktion insamling av salivprov från nyfödda barn för analys av munflora (mikrobiota)</b>	Version: 1.1.2	Gäller fr. o. m: 2016-10-09
Utfärdad av: Carina Lagerqvist/Carina Öhman/Hanna Nyström	Datum: 2016-09-29	
Granskad av: Christina West	Datum: 2016-10-09	

## Northpop - Instruktion insamling av salivprov från nyfödda barn för analys av munflora (mikrobiota)

---

Insamling av salivprov från det nyfödda barnet sker på BB Hemvård/Barn 4 i samband med PKU-provtagning. Personalen utför provtagningen och instruerar föräldrarna i hur provtagning skall gå till så att provtagning vid senare tillfällen kan utföras av föräldrarna själva i hemmet. Provtagningsinstruktion och en film finns även på [www.northpop.se](http://www.northpop.se).

- Barnet bör inte ha ammat/matats under senaste timmen före provtagningen.
- Barnets salivprov samlas med en bomullstops som snurras mot munslemhinna och tunga.
- **TÄNK PÅ ATT DE SMÅ RÖREN INNEHÅLLER EN VÄTSKA. SE TILL ATT VÄTSKAN ÄR I BOTTEN AV RÖRET OCH VAR FÖRSIKTIG NÄR NI ÖPPNAR DET!**

### Material från studien:

- Två sterilförpackade bomullstopsar
- Rör innehållande en vätska
- Zip-påsar (en liten påse till salivprovet och en stor påse till samtliga prover som ska tas vid ett och samma provtagningstillfälle).
- Kylväska med kylklamp och provtagningsmaterial.
- Etiketter
- Följesedel



### Provtagning:

1. Ta fram bomullstopsar och rör med vätska i. Fyll i barnets personnummer, datum och tid för provtagning på medföljande etikett som klistras på salivröret.
2. Snurra bomullstoppen på insidan av barnets kinder och på tungan.
3. Sätt ned bomullstoppen i röret och snurra i vätskan en stund. Ta upp topsen och släng bort den.

4. Upprepa samma procedur med den andra topsen i påsen; sätt ned topsen i samma rör, snurra i vätskan, ta upp och kasta bort topsen.
5. Tryck ned locket på röret ordentligt tills du känner ett litet knäpp.
6. Fyll i följesedeln att salivprov är taget och lägg följesedeln tillsammans med det märkta salivprovet i den lilla zip-påsen. **Detta är oerhört viktigt för att vi ska veta vem proverna kommer från!**
7. Sätt genast zip-påsen med provet och följesedeln in i den Northpop-frys som finns på BB Hemvård. Personalen kontrollerar att följesedeln är ifylld och ligger i zip-påsen.

*Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar under transporten för tillförlitliga analyssvar.*

Vid frågor, kontakta:

Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86 eller

Hanna Nyström, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57