

Titel: Northpop instruktion insamling av salivprov från barn för analys av munflora (mikrobiota)	Version: 1.1.2	Gäller fr. o. m: 2016-10-09
Utfärdad av: Carina Lagerqvist/Carina Öhman/Hanna Nyström		Datum: 2016-09-29
Granskad av: Christina West		Datum: 2016-10-09

Northpop - Instruktion insamling av salivprov från barn för analys av munflora (mikrobiota)

Insamling av salivprov vid 1 månads ålder och senare provtillfällen under studiens gång görs i hemmet av föräldrarna (vid 1 månad, 9 månader etc.).

- Barnet bör inte ha ammat/matats under senaste timmen före provtagningen.
- Barnets salivprov samlas med en bomullstops som snurras mot munslemhinna och tunga.
- **TÄNK PÅ ATT DE SMÅ RÖREN INNEHÅLLER EN VÄTSKA. SE TILL ATT VÄTSKAN ÄR I BOTTEN AV RÖRET OCH VAR FÖRSIKTIG NÄR NI ÖPPNAR DET!**

Material från studien:

- Två sterilförpackade bomullstopsar
- Rör innehållande en vätska
- Zip-påsar (en liten påse till avföringsprovet och en stor påse till samtliga prover som ska tas vid ett och samma provtagningstillfälle).
- Kylväska med kylklamp och provtagningsmaterial.
- Etiketter
- Följesedel



Provtagning:

1. Bomullstopsar och rör med vätska i tas fram. Barnets personnummer, datum och tid för provtagning fylls i på medföljande etikett som klistras på salivröret.
2. Bomullstoppen snurras på insidan av barnets kinder och på tungan.
3. Bomullstoppen sätts ned i röret och snurras i vätskan en stund. Toppen tas upp och slängs bort.
4. Samma procedur upprepas med den andra topsen i påsen, topsen sätts ned i samma rör, snurras i vätskan, tas upp och kastas bort.
5. Locket på röret trycks ned ordentligt tills det känns ett litet knäpp.

6. Följesedelns fylls i att salivprov är taget och läggs ner tillsammans med det märkta salivprovet och de övriga proverna som tas vid samma provtagningstillfälle, exempelvis avföring, bröstmjolk i stora zip-påsen. **Detta är oerhört viktigt för att vi ska veta vem proverna kommer från!**
7. Zip-påsen med provet/proverna sätts genast in i frysen. Kylklampen läggs också in i frysen så att den är fryst när proverna senare skall transporteras till Barnavårdscentralen/Hälsocentralen i samband med besök där.

Vid transport av prover från hemmet: Zip-påsen med prover och ***följesedel*** läggs ned i kylväskan tillsammans med kylklampen. Det är ***väldigt viktigt*** att proverna inte hinner tina under transporten. Personalen på Barnavårdscentralen/Hälsocentralen ser till att följesedeln är ifylld och att proverna genast ställs in i frys och senare transporteras vidare till sjukhuset.

Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar under transporten för tillförlitliga analyssvar.

Vid frågor, kontakta:

Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86 eller

Studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57