

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Titel: Northpop instruktion Mödrahälsovården, Lycksele, provtagning av mammor i samband med rutinprover vid graviditetsvecka 28 | Version: 1.2.1 | Gäller fr. o. m: 2022-03-28 |
| Utfärdad av: Carina Lagerqvist | | Datum: 2022-03-28 |
| Granskad av: Christina West | | Datum: 2022-03-30 |

Northpop - Instruktion till personal på Mödrahälsovården blodprov mamma v. 28

Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen (pdf-fil kan laddas ner från hemsidan: www.northpop.se)

Prov:

Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning.

- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd rören ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Skriv ut 3 st klisteretiketter med mammans namn och personnummer.
Skriv NORTHPOP på en av etiketterna och märk röret med denna.



Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Märk remissen med mammans namn och personnummer (använd en av klisteretiketterna).
De sista två etiketterna häftas fast på remissen, dessa är för labbets hantering av proverna.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs. **OBS! Väldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll.

Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med mammans namn och personnummer ska snarast möjligt skickas med ordinarie provtransport till Klinisk Kemi/Laboratoriemedicin Lycksele lasarett för vidare transport till Norrlands Universitetssjukhus. Vi ser gärna att proverna går med transport mitt på dagen så att proverna hinner tas omhand på Biobanken Norr, Umeå, under samma dag. Målsättningen är att få så bra infrysningstid som möjligt för att hålla en god kvalitet på proverna.

Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 090-785 22 86 eller studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57